

protect.Collar soft

Komfortable Halskrause
Comfortable support for the cervical spine
Collier cervical comfortable
Cómodo collarín

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.
Instrucciones de uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning.
Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Navodila za uporabo

protect.Collar soft

Назначение

protect.Collar soft представляет собой Головодержатель. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения грудного отдела позвоночника; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Болевой синдром в области шеи
- Шейный артроз
- Кривошея
- Последствия «хлыстовой травмы»
- Гипермобильность шейных позвонков
- Дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены при условии использования согласно инструкции.

Механизм действия

Стабилизация шейного отдела позвоночника с эффектом согревания и опоры. Ограничение движений.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
 - Не отбеливать.
 - Сушить на воздухе.
 - Не гладить.
 - Не подвергать химической чистке.
-



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Состав материала

Пенистый полиуретан, хлопок

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.