

medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**КОРСЕТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ**

**IBS-3006**

**IBS-2004**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## **СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

---

Корсет ортопедический Orlett с ребрами жесткости (4, 6, 8, в зависимости от размера) и дополнительными затяжкам, арт. IBS-3006, и корсет ортопедический Orlett с четырьмя ребрами жесткости из стандартной сетки, арт. IBS-2004, применяются при необходимости средней степени фиксации поясничного отдела позвоночника (Th12-S1), стабилизации связочно-суставного аппарата, устранении дисбаланса паравертебральных мышц в поясничном отделе и уменьшении нагрузки на мышцы поясницы. Отпускается без рецепта.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ IBS-3006**

---

- острый и хронический болевой синдром в пояснице на фоне:
  - радикулита, корешкового синдрома;
  - локализованного остеохондроза;
  - спондилоартрозов и спондилитов;
  - грыж и протрузий межпозвонковых дисков;
  - смещений позвонков;
- функциональная терапия при болях в пояснице в комплексе с мануальной терапией, массажем, медикаментозными методами лечения;
- профилактика травм и обострения заболеваний поясницы при вертикальных нагрузках (статических и динамических);
- закрепление достигнутого эффекта после мануальной терапии и лечебной гимнастики.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ IBS-2004**

---

- начальные проявления болевого синдрома в пояснице на фоне:
  - напряжения мышц и мышечного дисбаланса;
  - функционального сколиоза;
  - функционального укорочения одной из нижних конечностей;
  - смещений позвонков (спондилолистез I степени);
- позднесрочная реабилитация после травм и операций на поясничном отделе позвоночника;

- функциональная терапия в комплексе с мануальной терапией, массажем, медикаментозными методами лечения при незначительных поражениях;
- опущение внутренних органов брюшной полости;
- профилактика травм и заболеваний поясницы при работе с тяжестями;
- длительные статические и динамические нагрузки на поясничный отдел, возникающие по роду повседневной деятельности.

## РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

---

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

- беременность;
- невосприимчивые грыжи брюшной стенки, свищи;
- диафрагмальные грыжи;
- синдром портальной гипертензии;
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения корсета.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

---

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача. Людям с особо чувствительной кожей следует надевать корсет на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование корсета и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## КОНСТРУКЦИЯ КОРСЕТА IBS-3006

Корсет ортопедический Orlett с ребрами жесткости (4, 6, 8, в зависимости от размера) и дополнительными затяжками, арт. IBS-3006, состоит из следующих элементов (рис. 1 и 2):

1. Фиксирующий пояс из нерастяжимой плотной сетки с застежкой-липучкой велкро.
2. Поддерживающие ремни (подтяжки).
3. Дополнительные затяжки (ленты усиления).



рис. 1



рис. 2

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Корсет рекомендуется одевать лежа на спине.

1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей.
2. Зафиксировать подтяжки:
  - стандартным способом (рис. 1);
  - с легким реклинирующим эффектом для улучшения осанки (пропустить подтяжки под мышками и закрепить их сзади на корсете) (рис. 2);
3. Затянуть и застегнуть дополнительные затяжки (ленты усиления).

## КОНСТРУКЦИЯ КОРСЕТА IBS-2004

Корсет ортопедический Orlett с четырьмя ребрами жесткости из стандартной сетки, арт. IBS-2004, состоит из следующих элементов (рис. 3):

1. Фиксирующий пояс из малорастяжимой плотной сетки с застежкой-липучкой велкро.
2. Дополнительные затяжки (ленты усиления).

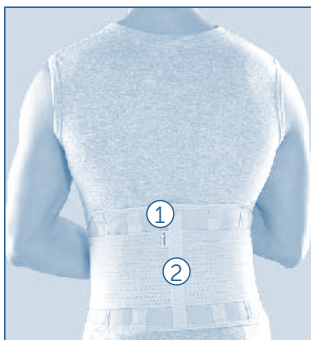



рис. 3

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Корсет рекомендуется одевать лежа на спине.

1. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3 см гребней подвздошных костей.
2. Затянуть и застегнуть дополнительные затяжки (ленты усиления).

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

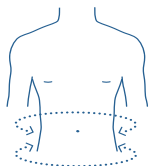

Для корректного подбора ортопедического корсета Orlett, арт. IBS-3006 и арт. IBS-2004, необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать корсет Orlett по таблице подбора размеров.

## ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер (по объему)	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
XS	до 70
S	70-85
M	85-97
L	97-105
XL	105-115
XXL	115-125
XXXL (только для IBS-3006)	125-140

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

## СОСТАВ

Ортопедический корсет IBS-3006: 30% полиэстер, 23% полиамид, 12% эластан, 10% латекс, 5% полиуретан, 2% этиленвинилацетат, 15% сталь, 3% поливинилхлорид.

Ортопедический корсет IBS-2004: 38% полиэстер, 20% полиамид, 10% эластан, 10% латекс, 5% хлопок, 5% полиуретан, 10% сталь, 2% поливинилхлорид.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

---

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

---

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

---

Срок годности не установлен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Ортопедическое изделие арт. IBS-3006, инструкция по применению.

Ортопедическое изделие арт. IBS-2004, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74412 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Арт.: INTO16-IBS-3006/2004-N3\_08/17